




OVULAČNÍ TEST PROUŽEK COMFORT 6 ks + 2 ks těhotenského testu proužek zdarma

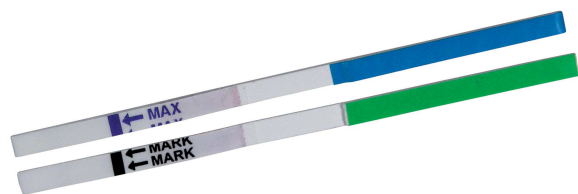

Komponenta:
8595041621045 LH proužek ASP + 8595041621977 TT proužek ASP



LH PROUŽEK COMFORT pro včasnou diagnózu ovulace

Jednorázový ovulační test pro sebetestování – rychlý – přehledný - jednoduchý test určený k průkazu LH v moči

Kdy začít s testem: Nejprve si ověřte délku Vašeho menstruačního cyklu. To je počet dní od prvního dne menstruačního krvácení až do dne předcházejícímu začátku dalšího krvácení. Podle tabulky vyberte den od zahájení menstruace, kdy začnete s testem. Pokud je Váš cyklus kratší než 21 dnů nebo delší než 38 dnů, poraďte se se svým lékařem. Pokud neznáte délku svého cyklu, začněte testovat 11 dní od prvního dne krvácení, protože průměrná délka cyklu je 28 dní. Provádějte vždy 1 test každý den po dobu 5 dní nebo dokud není test pozitivní.

Odběr moči: K testu nepoužívejte vzorky ranní moči, neboť hladina LH se projevívá v moči až během dne. Nejlepší čas k odběru moči je od 10 do 20 hodin. Moč odeberte každý den ve stejnou dobu a asi 2 hodiny před odběrem moči omezte příjem tekutin, zředěný vzorek moči by mohl ovlivnit výsledek testu.

Návod: Před začátkem testu si zkontrolujte datum expirace a neporušenost fóliového sáčku s testem. Moč odeberte do suché, čisté nádoby. Vzorek moči i ovulační test by před testem měly mít pokojovou teplotu. Vyjměte testovací proužek z obalu a ponořte jej do vzorku moči na 4-5 vteřin tak, aby hladina moči byla pod čarou označenou MARK (MAX). Proužek položte na rovný povrch nebo přes okraj nádoby a vyčkejte. První výsledky se mohou objevit již do 40 vteřin. Aby byl test správně vyhodnocen je třeba výsledek odečíst až po 10ti minutách. Po 30ti minutách již výsledek nelze hodnotit.

Hodnocení výsledků

1. Pozitivní výsledek (vzestup LH): Jsou vidět dva stejně barevné proužky v kontrolní i testovací zóně nebo je proužek v testovací zóně tmavší než v kontrolní zóně. S vysokou pravděpodobností dojde k ovulaci v příštích 24 - 48 hodinách. Pokud chcete otěhotnět, nejlepší doba pro pohlavní styk je po 24 hodinách a nejpozději do 48 hodin po pozitivním výsledku testu. (viz obrázek 1.)

2. Negativní výsledek (nedošlo k dostatečnému vzestupu LH): Objeví se jen proužek v kontrolní zóně a žádný nebo světlejší proužek v testovací zóně. Vždy hodnotěte až po 10ti minutách. (viz obrázek 2.)

3. Výsledek nelze hodnotit: Jestliže se po 10ti minutách nezbarví žádný proužek ani v testovací ani v kontrolní zóně, nebo se objeví proužek jen v testovací zóně, pak test nemůže být považován za platný. Obvykle je to způsobeno různými nečistotami nebo nesprávným postupem.

Skladování a stabilita: Test se může uchovávat při pokojové teplotě (5 až 25°C) v utěsněném obalu až do doby expirace. Sada testu by měla být uchovávána mimo přímé sluneční světlo, vlhkost a horko.

Upozornění: v případě, že v průběhu testu nedojde k pozitivnímu výsledku je možné, že žena patří mezi malé procento těch, které ovulují krátce po ukončení menstruace a proto musí s testem začít dříve. Před použitím vždy zkontrolujte datum expirace, které je uvedeno v prolisu na okraji obalu.

Na obalu i návod k použití těhotenského testu viz. Nabídkový list TĚHOTENSKÝ TEST PROUŽEK COMFORT

Citlivost 25 mIU/ml (25 IU/l) ve shodě s doporučením WHO

TEXT (200901)

Obsah: 6 kusů ovulačního testu PROUŽEK ASP + 2 ks těhotenský test proužek ASP

Skladujte v suchu při teplotě 5 – 25 °C. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Výrobce: Nantong Egens Biotechnology Co., Ltd., Nantong, China

Zplnomocněný zástupce: PERCOM® spol. s r.o., Radyňská 27-29, 326 00 PLZEŇ, CZ14702631, INFO: 377 456 276, e-mail: percom@centrum.cz, www.percom.cz.

Balení :

- 6 krabiček v bílé krabici, 36 bílých krabic v kartonu, karton 60x40x40 cm = 216 krabiček
- 30 krabiček ve hnědé krabici, 8 hnědých krabic v kartonu, karton 60x40x40 cm = 240 krabiček



Obr.1 - pozitivní



Obr.2 - negativní



délka vašeho cyklu	den začátku testování	délka vašeho cyklu	den začátku testování
21 dní	6. den	30 dní	15. den
22 dní	7. den	31 dní	16. den
23 dní	8. den	32 dní	17. den
24 dní	9. den	33 dní	18. den
25 dní	10. den	34 dní	19. den
24 dní	11. den	35 dní	20. den
27 dní	12. den	36 dní	21. den
28 dní	13. den	37 dní	22. den
29 dní	14. den	38 dní	23. den

Tabulka k určení začátku testování

