



LÉTÁKY NA PODPORU PRODEJE

JEDNORÁZOVÝ těhotenský test

RYCHLÁ ODPOVĚĚ


V ženské populaci existuje vysoké procento žen s nepravidelnými měsíčky, proto vynechání menstruace neznamená vždy těhotenství. Těhotenský test Vám umožní přestat žít v nejistotě.

Na jakém principu test pracuje

Test pracuje na principu imunoanalýzy. Pomocí testu se prokazuje hCG v moči. hCG (lidský choriogonadotropin) je glykoproteinový hormon, který se vytváří v placentě a dostává se do krve a moči po otěhotnění.

Od kdy je test pozitivní

Musíme si uvědomit, že od pohlavního styku s následným otěhotněním musí uplynout doba zpravidla 10 - 12 dnů, než je možno kterýmkoliv testem prokázat hCG v moči. Nejprve musí mužská pohlavní buňka doputovat k vajíčku, potom se s vajíčkem spojit, oplodněné vajíčko se dostává do dělohy, kde se zahnízdí a až potom dochází k produkci hCG.

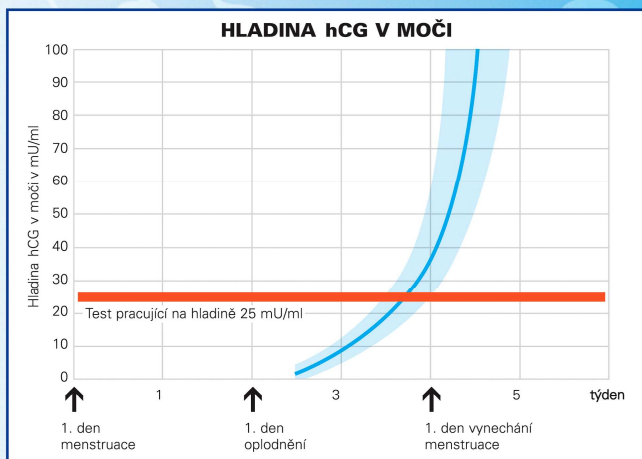

Citlivost testu


Nejcitlivější testy prokáží hCG v moči již od hladiny 10 mU/ml. Na trhu nejméně citlivé testy prokazují hCG od hladiny 50 mU/ml.

Test s citlivostí 25 mU/ml

je rozumný kompromis mezi kvalitou a cenou. Jak je patrné z grafu, test je pozitivní již 1 až 2 dny před vynecháním menstruace při pravidelném menstruačním cyklu. Má minimum falešně pozitivních či negativních výsledků a může jej proto vyhodnocovat i laik. Je spolehlivý i v krajních situacích a vyšetření může být provedeno kdykoliv v průběhu dne.

MUDr. Luděk Pitter


TEST LUX přesný a stabilní

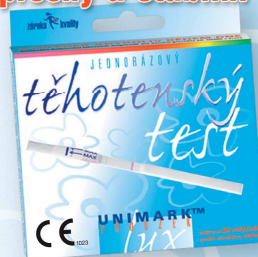

UniMark™ – Proužek

Tento typ testu dá rychlou odpověď ještě před návštěvou lékaře. Případné těhotenství, stejně jako ostatní testy, signalizuje již od prvního dne vynechání menstruace a lze jej provést v kteroukoliv denní či noční dobu.

JEDNORÁZOVÝ těhotenský test

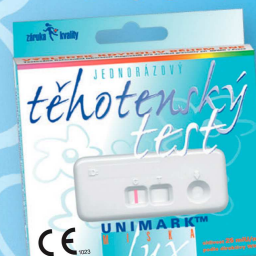

JEDNOZNAČNÉ

UniMark™ – Miska

Test vybavený testovací miskou a dávkovačem umožňuje komfortnější provedení. Vyžaduje však, stejně jako předchozí test, odběr moči do suché čisté nádoby. Test je využíván rovněž odbornými laboratořemi. Pozitivní výsledek se projeví růžovořivým pruhem v testovací i v kontrolní zóně.



DISKRÉTNÍ

UniMark™ – Tyčinka

Spolehlivost, jednoznačnost a diskrétnost – to jsou přednosti tohoto testu. Tyčinka se pouze vysune z plastového pouzdra a podrží v proudu moči. Při vysunutí se testovací okénka překryjí plastem, který je chrání před případným rozstříkáním moči. Tyčinku potom zasuneme zpět do pouzdra a do 5ti minut známe výsledek.

PERCOM® spol. s r.o.
Radyňská 27-29, 326 00 PLZEŇ
Info: 377 456 276, www.percom.cz
e-mail: percom@centrum.cz

TEST COMFORT kvalitní s dobrou cenou

